

CSCO-ECCO-至本

基因大数据平台 WES+ 取样要求

组织样本：

请选择当时手术治疗时的样本蜡块或切片（FFPE 样本）

1. 白片厚度 4-5 μm ，表面积大于 1 cm^2 。手术组织连续切片 30 张。烤片时间控制在 10-15 分钟内，每张切片需标有病理号和切片序号（切勿直接送检卷片）；
2. 一次手术通常有多个肿瘤蜡块保存。请选择肿瘤含量高，且无坏死组织的蜡块/切片送检。

血液样本：

1. 采血量:须采集 2 管,每管 8-10 mL 的静脉血（空采血管的容积为 10ml）；
2. 使用一次性静脉采血针，连接 STRECK R 血液保鲜管采血，严禁使用注射器抽血后再灌入采血管方式采血；
3. 采完血后轻柔颠倒 10 次，使采血管中的液体与血液充分混匀；混匀完成后请将采血管立即放入采血包的指定位置并固定，及时交付；
4. 采血后最适保存温度是 6 $^{\circ}\text{C}$ -37 $^{\circ}\text{C}$ 并严禁冻融；考虑到包装材料、运输方式可能对采血管温度造成额外影响，运输发出地和目的地任一最低气温低于 6 $^{\circ}\text{C}$ ，或任一地最高气温高于 30 $^{\circ}\text{C}$ 时，将统一使用恒温运输方式；其余情况使用常温运输方式；

5. 同一病人多管采血时采血管需在 EDTA 抗凝管之后采血；(补充说明：采血管的采血顺序应在 EDTA 抗凝管之后，在草酸钾 - 氟化钠采血管之前，且不能紧接着肝素采血管之后使用采血管；
6. 未使用的采血管需存放于 2°C-30°C。